



## Príprava pred aplikáciou

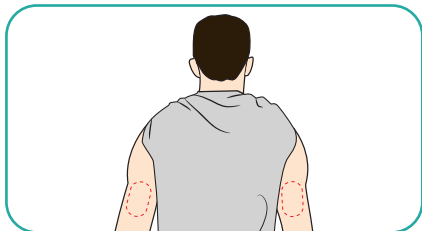

① Vyberte miesto aplikácie senzora: zadná strana hornej časti ramena.

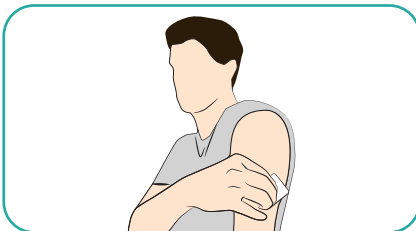


② Miesto vydezinfikujte alkoholom a nechajte ho vyschnúť.



③ Otvorte kryt balenia senzora a aplikátora senzora.


## Zostavenie produktu

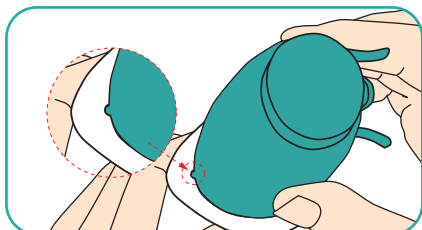

① Zarovnajte aplikátor so sensorovým balením podľa označení.



② Položte zariadenie na rovný a pevný povrch a pevne zatlačte nadol, až kým sa úplne nezastaví.


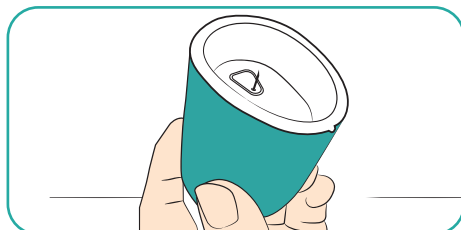


③ Vyberte aplikátor zo sensorového balenia a skontrolujte stav nainštalovania senzora.


## ⚠ Pokyny k zostaveniu



① Zariadenie zostavujte na rovnom a pevnom povrchu.

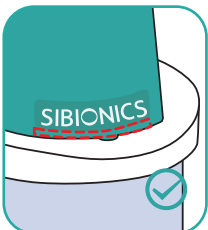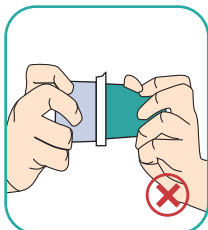

② Uistite sa, že ste ho zatlačili úplne nadol: spodný okraj anglického nápisu SIBIONICS na aplikátore senzora by mal byť zarovnaný s okrajom sensorového balenia.

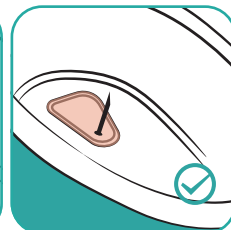


③ Malý plastový diel, ktorý drží mäkkú ihlu, a okolitá lepiaca páska by mali byť v rovnakej úrovni. Ak nie sú v rovnakej úrovni, zopakujte kroky zostavenia produktu.


## Aplikácia CGM senzora



① Odstráňte bezpečnostnú poistku.

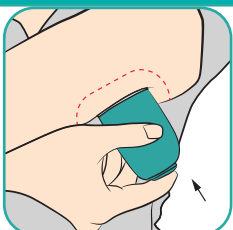


② riložte aplikátor senzora na vydezinfikované miesto a stlačením uvoľňovacieho tlačidla senzor aplikujte.

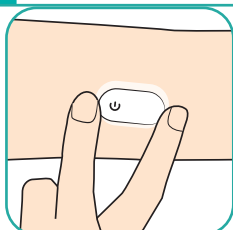

③ Odtiahnite aplikátor senzora od ramena a pevne pritlačte lepiacu náplasť, aby bola aplikácia dokončená.

## Pripojenie senzora k telefónu

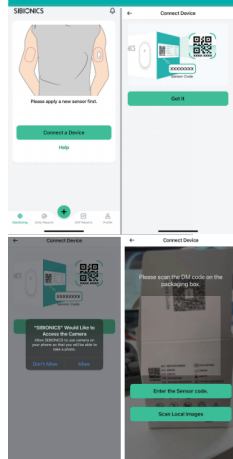

① Otvorte aplikáciu SIBIONICS a kliknite na tlačidlo „Pripojiť zariadenie“

② Pomocou fotoaparátu naskenujte QR kód na balení senzora.

③ Po 60-minútovom zahrievaní si môžete zobrazíť svoje CGM dáta.

## Upozornenia pred použitím

1. Skontrolujte, či balenie senzora a aplikátor nie sú po dátume expirácie.
2. Požiadavky na operačný systém pre aplikáciu SIBIONICS:  
Android verzia 8.0 a vyššia alebo iOS verzia 13.6 a vyššia.
3. Senzor neaplikujte na miesta s materskými znamienkami, jazvami, striami, hrčkami alebo na miesta vpichu inzulínu.

## Upozornenia počas používania

1. Pred vyšetrením magnetickou rezonanciou odstráňte CGM senzor.
  2. Bežné kúpanie, sprchovanie a plávanie sú povolené, čas ponorenia však nesmie presiahnuť 1 hodinu, aby sa predišlo odlepeniu senzora.
  3. Vyhýbajte sa namáhavému cvičeniu, aktivity strednej intenzity, napríklad beh, sú povolené.
  4. Vyhýbajte sa silným nárazom do senzora alebo jeho silnému stláčaniu.
  5. Počas nosenia sa odporúča nevystavovať senzor prostrediu s vysokou teplotou, napríklad saune.
- Prevádzková teplota produktu je od 5 °C do 40 °C. Ak je senzor vystavený teplotám mimo tohto rozsahu, môže to ovplyvniť presnosť CGM dát.

Pozor: Senzor má vodoodolnosť IP28, čo znamená, že vydrží ponorenie do vody do hĺbky 1 meter maximálne na 1 hodinu.

## Upozornenia po použití

1. Po odstránení senzora vydezinfikujte miesto aplikácie alkoholom.
2. Aby ste predišli podráždeniu pokožky, pri aplikácii nového senzora zmeňte miesto aplikácie.